



microPRESS H-Tec Gengiva Istruzioni d'uso

Intensivi per la caratterizzazione della protesi

microPRESS H-Tec Gengiva è una resina autopolimerizzante a freddo con nano-tecnologia ad alta carica di microperle a bassa contrazione e ridotto assorbimento e rilascio di monomero residuo grazie alla sua struttura molecolare sferica e multigrana. Alta stabilità di colore con il nuovo catalizzatore. Non contiene ammine terziarie e non contiene Cadmio

microPRESS H-Tec Gengiva è la polvere di microPRESS H-Tec saturata in due colori LIGHT PINK e DARK PINK sono due colori Rosa chiaro e Rosa scuro che miscelati con la resina Rosa o Rosa venata, permettono la caratterizzazione della flangia nella protesi.

Sfumature ombreggiate naturali effettuate in maniera semplice veloce. Miscelare la resina fino ad ottenere un impasto plastico e facilmente modellabile, miscelare e saturare a scelta in base all'esperienza per la caratterizzazione:

Il **Light Pink** è utilizzato per applicarlo ed evidenziare le parti concave all'interno del controstampo soprattutto nelle zone bombate dei denti dove abbiamo colori più chiari.

Il **Dark Pink** è utilizzato nelle zone convesse, vicino ai margini della protesi dove risultano ombreggiature naturali più scure.

Tecnica d'uso:

Impastare microPRESS H-Tec Gengiva e miscelare con la polvere della resina Rosa o Rosa Venato fino ad ottenere la saturazione desiderata, cercare di ottenere una consistenza plastica facilmente modellabile

Applicare il **Light Pink** come sopra descritto nelle zone concave e il **Dark Pink** .

Mantenere bagnate con il liquido microPRESS H-Tec prima di chiudere il controstampo abbinandolo al modello in gesso.

In fase di rifinitura della protesi è possibile applicare e caratterizzare ulteriormente in superficie e all'interno ed all'esterno con gli intensivi di colore **microAcryl super Color** (vedi istruzioni) miscelandoli sempre con la resina microPRESS H-Tec Rosa o Rosa Venato, alla fine polimerizzare ulteriormente.



Via Torrette Battifoglia Zona Industriale, Fraz. S.Andrea Delle Fratte, 06132 Perugia Italy P.Iva 03533540542
info@micropolymerdental.com
www.micropolymerdental.com

CE 0425
Class IIa

Phone: (+39) 327 4572 561

Phone/Fax +39 0924 49 089